

Biatain[®] ikke klæbende

- optimal absorption til sår med sarte hudomgivelser



Biatain ikke klæbende er en blød og formbar polyurethan skumbandage.

- Unik 3D skumstruktur for optimal absorption¹⁻³
- Minimal maceration og lækage¹
- Lang bæretid
- Blød og formbar bandage^{4,5}



Anvendelse

Biatain ikke klæbende anvendes til en lang række væskende sår, herunder bensår, tryksår, diabetiske fodsår, 2.grads forbrændinger, donorsteder, postoperative sår og hudafskrabninger. Biatain ikke klæbende kan anvendes sammen med kompressionsbehandling.



Biatain®

Non-Adhesive

Biatain ikke klæbende og Biatain Soft-Hold er bløde og formbare skumbandager, der effektivt absorberer og retinerer sårvesken.^{1,2} På den måde skabes en fugtig balance, som er optimal til heling af væskende sår.^{7,8}



Unik 3D skumstruktur for optimal absorption

Når sårvesken er i kontakt med skumstrukturen, former Biatain sig tæt efter sårbundet for en optimal absorption - selv under kompression.¹⁻³

Minimal maceration og lækage¹

Den optimale absorption og retention af sårvesken minimerer risikoen for maceration og lækage. Biatain ikke klæbende og Biatain Soft-Hold er velegnet til sår med meget sart og skrøbelige hudomgivelser.

Lang bæretid

Biatain har en lang bæretid på grund af den optimale absorptionskapacitet. Kliniske studier har vist, at Biatain er en omkostningsbesparende løsning med en bæretid op til 7 dage.⁶⁻⁸

Blød og formbar bandage

Biatain ikke-klæbende er meget behagelig at have på og de affasede kanter reducerer risikoen for trykmærker.⁴


Virkning

3D skumstrukturen i Biatain absorberer sårvesken vertikalt og holder væsken inde i bandagen, så der opretholdes et fugtigt sårhelingsmiljø.

Opbygning

Biatain ikke-klæbende består af blød og formbar polyurethanskum og en semi-permeabel topfilm, som er vand- og bakterietæt. Biatain Soft-Hold har desuden et let-hæftende lag på skumpuden, og er derfor velegnet til sår, der er vanskelige at bandagere og fungerer som den 3. hånd ved bandageskift.

Unik 3D skumstruktur

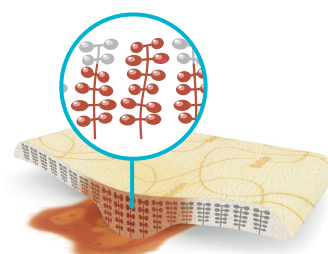

Biatain ikke klæbende

Vare nr.	Størrelse i cm	Antal æske
3410	10x10	10
3412	10x20	5
3413	15x15	5
3416	20x20	5
6105	5x7	10

Biatain Soft Hold

Vare nr.	Størrelse i cm	Antal æske
3470	10x10	5
3472	10x20	5
3473	5x7	5
3475	15x15	5

1. Andersen et al. Ostomy/Wound Management 2002;(4)8:34-41
2. Thomas et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/ Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf
3. Reitzel et al. EWMA 2008
4. Jørgensen et al. EWMA 2008
5. Vogensen. British Journal of Nursing 2006;15(21):1162-65
6. Bale et al. EWMA 2002
7. White R and Cutting KF. Modern exudate management: a review of wound treatments. WorldWideWounds 2006.
8. Romanelli et al. Exudate management made easy, Wounds International 2010;1(2).