

Biatain[®] Alginate

- optimal absorption til fibrinbelagte sår og kaviteter



Biatain Alginate er en kraftigt absorberende alginatbandage til moderat til kraftigt væskende sår i alle størrelser, form og dybde.

- Idéel til kaviteter³
- Unik bandage sammensætning^{1,2}
- Minimal risiko for lækage og maceration
- Dokumenteret hæmostatisk effekt⁴



Anvendelse

Biatain Alginate anvendes til moderat til kraftigt væskende sår, herunder bensår, tryksår, diabetiske fodsår, donorsteder, traumatiske sår og 2. grads forbrændinger. Biatain Alginate kan håndtere lettere blødninger i overfladiske sår. Biatain Alginate kan anvendes under kompression. Biatain Alginate bør ikke anvendes til tørre eller let væskende sår eller til stærkt blødende sår.



Biatain® Alginate

Biatain Alginate er en kraftigt absorberende alginatbandage til moderat til kraftigt væskende sår i alle størrelser, form og dybde. Biatain Alginate har en optimal absorption sammenlignet med andre alginater og fiberbandager.¹



Idéel til kaviteter

Designet og strukturen gør det muligt at klippe og tilpasse bandagen til alle størrelser, former og dybde af sår. Bandagen former sig efter sår bunden, som er vigtig i sårhelingsprocessen.

Unik bandage-sammensætning

Det er muligt at fjerne bandagen i ét stykke med minimal smerte og traume for patienten.^{1,2}

Minimal risiko for lækage og maceration

Den optimale absorption i Biatain Alginate^{1,2} og dannelse af gel, som holder sår væsken inde i bandagen, hindrer lækage, som kan ødelægge den omkringliggende hud.

Dokumenteret hæmostatisk effekt

I modsætning til hydrofiber bandager, så har Biatain Alginate en dokumenteret hæmostatisk effekt, f.eks stoppe mindre blødninger via frigivelse af kalcium ioner fra bandagen.⁴


Virkning

Ved absorption af sår væske dannes en blød, sammenhængende gel, som fremmer sårhelingen i et optimalt fugtigt sårhelingsmiljø.²

Opbygning

Biatain Alginate er en alginatbandage, der består af 85% kalciumalginat og 15% hydrokolloid (CMC).

Biatain Alginate har en optimal absorption sammenlignet med Aquacel®¹

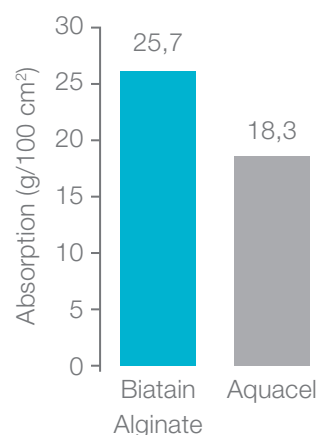

Biatain Alginate

Vare nr.	Størrelse i cm	Antal æske
3705	5x5	30
3710	10x10	10
3715	15x15	10
3740	3x44 filler	6

1. Thomas et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf
2. Timmons. Professional Nurse 1999;14(7).
3. <http://www.worldwidewounds.com/1998/june/Alginates-FAQ/alginates-questions.html>
4. Segal et al. Journal of Biomaterials Applications 1998;249.