


Physiotulle[®] Ag

-hurtigere sårheling ved forebyggelse og kontrol af lokal infektion

Physiotulle Ag er et hydrokolloidbaseret sårkontaktlag uden klæber med sølv. Physiotulle er varianten uden sølv.

- Nem at håndtere og bruge
- Behagelig og beskyttende
- Vedvarende og kontrolleret sølvfrigivelse
- Understøtter fugtig sårheling^{1,3}

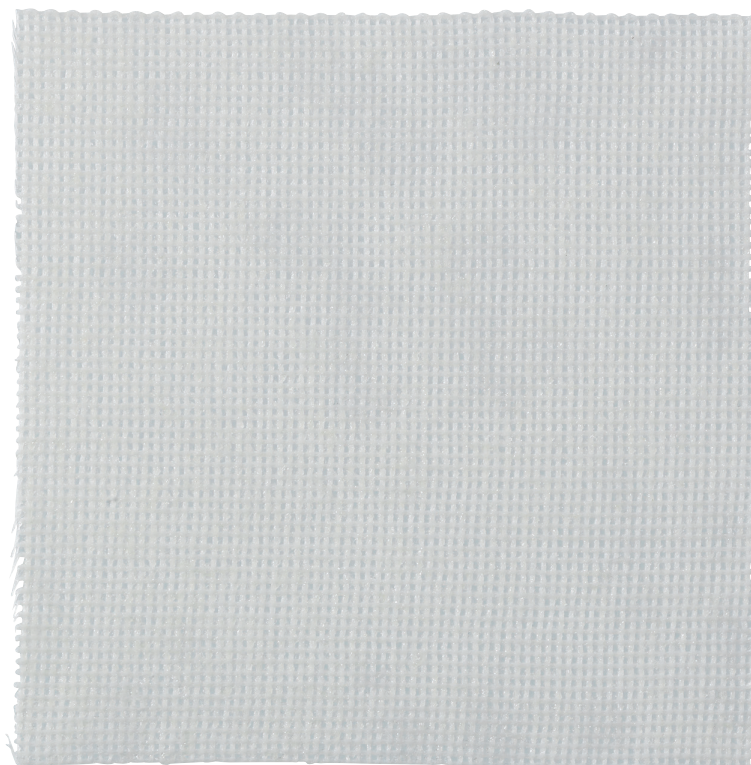

Anvendelse

Physiotulle Ag anvendes fra lavt til kraftigt væskende kroniske og akutte sår. Physiotulle Ag anvendes til sår med forsinket heling på grund af bakterier eller hvor der er risiko for infektion. Er sikker at bruge under MRI2. Kan anvendes sammen med kompressionsbehandling og i kombination med Biatain Ibu til inficerede, smertefulde sår.



Physiotulle

Ag

Physiotulle Ag er et ikke klæbende sårkontaktlag med sølvsulfadiazin, som den aktive komponent.

Nem at håndtere og bruge

Physiotulle Ag og Physiotulle hænger ikke i handsker eller saks, når de sættes på såret. Strukturen er tynd og fleksibel og er ideel til alle typer væskende sår.

Behagelig og beskyttende

Physiotulle Ag og Physiotulle tørrer ikke såret ud eller hænger i sårbanden, og derfor er aftagning uden smerter. Sårkontaktlagene kan anvendes i kombination med absorberende sekundærbandager.

Vedvarende og kontrolleret sølvfrigivelse

Sølvioner frigives til sårbanden, når Physiotulle Ag absorberer sårveske. Der frigives sølv gennem hele bandagen bæretid (op til 3 dage).

Understøtter fugtig sårheling


Sårvesken absorberes op i den absorberende sekundærbandage gennem den åbne væv-struktur i Physiotulle Ag. Det er påvist, at bandagen reducerer sårstørrelsen med 55% efter 4 ugers behandling.^{3,6}

Virkning

Ved kontakt med såret absorberer hydrokolloidpartiklerne sårvesken og sølvsulfadiazin frigives til sårbanden.

Opbygning

Physiotulle består af et tæt vævet polyester-net imprægneret med hydrokolloidpartikler (CMC) i en vaseline-gel. Physiotulle Ag indeholder derudover sølvsulfadiazin, som er effektiv mod et bredt spektrum af bakterier, herunder MRSA.^{5,6}

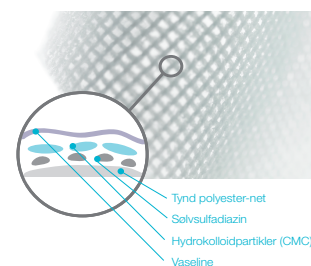

Physiotulle

Vare nr.	Størrelse i cm	Antal æske
3910	10x10	10
3915	15x20	10

Physiotulle Ag

Vare nr.	Størrelse i cm	Antal æske
3926	10x10	10
3927	15x15	10

1. Humbert, et al. Impact Medicine, France – March 2003.
2. Hanson et al. EWMA & ETRS 2005
3. Jørgensen et al. Journal of Wound Care 15(3), 2006
4. Jørgensen et al. Journal of Wound Care 17, No 5, 2008.
5. Fox. Archives of Surgery, Vol 96 p. 184-188, 1968.
6. Hamilton-Miller et al. Chemotherapy, Vol 39(6) p. 405-409, 1993