

Peristeen®

Peristeen® Analprop

- for personer med luft- eller afføringsinkontinens

Analproppen er

- let at håndtere
- let at indføre
- let at fjerne



Peristeen® Analprop

Peristeen Analprop

- er et enkelt og effektivt hjælpemiddel, der sætter en stopper for et stort problem: Luft- eller afføringsinkontinens.

Analproppen kan bruges af personer med luft- og afføringsinkontinens og fungerer ved at holde afføringen tilbage i endetarmen.

Analproppen kræver en kort tilvænningsperiode, hvis man har normal følelse i endetarmsområdet. For dem, der har nedsat eller ødelagt følelse, vil det kun i få tilfælde være nødvendigt med en tilvænningsperiode.

Afføringen skal helst være fast og formet. Analproppen må ikke bruges ved diarré.

Blødt materiale

Peristeen Analprop er fremstillet af et blødt og behageligt skummateriale, der bevarer sin blødhed i brug, og tillader luft at passere.

Simpel håndtering

Analproppen holdes sammenpresset af en vandopløselig film. Når proppen føres op i endetarmen, kommer filmen i kontakt med varme og fugt fra tarmen, hvorefter den opløses. Dette sker i løbet af 30 sekunder.



Effektiv i brug

Peristeen Analprop folder sig ud inde i tarmen og bliver 3-4 gange større end den oprindelige størrelse. Den tager form efter tarmvæggen og beskytter således mod utæthed. Det betyder også, at risikoen for hud- og lugtgener reduceres betydeligt.

Proppen kan sidde i tarmen i op til 12 timer.

To størrelser

Da to mennesker ikke er ens, findes analproppen i to størrelser: Lille og stor. Prøv begge størrelser for at finde den, der passer bedst.

Tilbehør

Peristeen Analprop leveres med en tube gel, som smøres på spidsen af proppen for at lette indføringen.

Produktoversigt

Peristeen Analprop

Foldet	Ufoldet	Størrelse	Varenummer
Diameter			
12 mm	37 mm	Lille	1450
13 mm	45 mm	Stor	1451

