



Husk altid at vaske hænder før og efter bandageskift.


Følg altid lokale procedurer med hensyn til infektionsrisiko.

Note: Denne guide er tænkt som generelle retningslinjer. Husk altid at tjekke de lokale anbefalinger på din afdeling eller i din kommune.

Håndvask




Øre

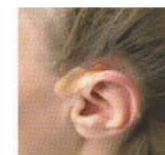

Til sår, der skyldes en lit slange, der gnider på øret, kan man klippe halvt igennem en tynd hydrokolloid (2 x 3 cm), sætte den uklippeede del fast til hovedet og derefter sætte de to halve dele fast på øret. På samme måde kan næseregionen bandageres.



Øre

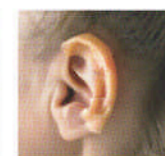

Anvend en tynd hydrokolloid (5x7 cm). Klip den i en aflang strimmel, fold den på midten i længderetningen og klip derefter en fynse på langs i den ene ende, ca 1,5 cm inde. Fastgør den ende, der ikke er klippet i først og brug den opklippede del til at folde omkring øret. Hvis såret væsker, kan man bruge et lille stykke alginat under forbindingen.



Øre



Brug en ikke klæbende eller en Soft-Hold bandage til denne type sår. Klip bandagen, så den passer til øret. Fikser med en passende sekundær bandage.



Albue



Klip 2 små slidser i forbindingen, påsæt den og form den om albuen. Husk at sætte den på, men patienten bøjer albuen i en 90° vinkel.

Noter



Hånd



Når håndsiden skal forbindes, klippes en lille revne ved hjørnet af bandagen til tommel- eller lillefinger. Derefter formes bandagen omkring hånden.



Finger



Til sår mellem fingrene klippes en lille slids i bandagen til fingeren. Fikser med en passende sekundær forbindelse.



Finger



Til små sår på fingrene eller mellem fingrene kan en transparent tynd hydrokolloid bandagen nemt klippes i passende stykker til såret.




Finger



Bandage til flere fingre.



Hæl

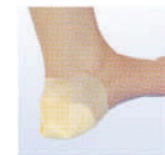

Der findes et utal af forskellige hælbandager, så det er vigtigt at vælge netop den bandage, der passer til den enkelte patient.

Noter




Armhule



En hælbandage kan være en god løsning til bandagering i armhulen. Vær opmærksom på sårvesken og påsæt den bredeste del af bandagen som vist på billedet.



Brystbenet

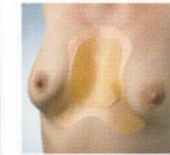

Comfeel Plus Contour bandage passer specielt godt til kvinder. Klip bandagen så den passer til kvindens bryst.



Peristoma sår



Hvis såret er tæt på en stomi, skal man være opmærksom på, om bandagen skal placeres oven på eller under stomipladen.




Sakral



Brug den tyndest mulige bandage. Der findes mange sakralbandager, så det er vigtigt netop at vælge den, der passer bedst til din patient. Vær opmærksom på om såret er et tryksår eller et væskende sår, da behandlingen er meget forskellig.



Sakral

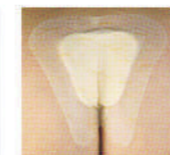

Hvis såret væsker, kan der anvendes en skumbandage og/eller en alginatbandage (Vælg en passende sekundær forbindelse til alginatbandagen).

Noter



Krybst



Til brug på store-tåen og sår mellem tæerne. Fikser med en sekundær bandage.



Tæer



Klip revner i bandagen og brug den til sår mellem tæerne. Fikser med en sekundær bandage.



Tæer



Sår på tåspidsen og til sår mellem tæerne. Læg tubegaze udenom.



Tæer



Klip en tynd hydrokolloid forbindelse i en form som en sommerfugl.



Tæer



Til væskende sår mellem tæerne anvendes en skumbandage, som skal fikses med en sekundær bandage.

Noter

Produktoversigt

Biatain Ibu

Str. (cm)	Varenr.
5 x 7 Ikke klæbende	4105
10 x 10 Ikke klæbende	4110
10 x 20 Ikke klæbende	4112
15 x 15 Ikke klæbende	4115
20 x 20 Ikke klæbende	4120
10 x 10 Soft-Hold	4140
10 x 20 Soft-Hold	4142

Biatain (specialformer)

Str. (cm)	Varenr.
17 x 17 Sakral	3483
23 x 23 Sakral	3485
19 x 20 Hæl	3488

Biatain Ag ikke klæbende

Str. (cm)	Varenr.
5 x 7	5105
5 x 8 filter	9628
10 x 10	9622
10 x 20	9623
15 x 15	9625
20 x 20	9626

Biatain ikke klæbende

Str. (cm)	Varenr.
5 x 7	6105
10 x 20	3410
10 x 20	3412
15 x 15	3413
20 x 20	3416

Biatain Ag klæbende

Str. (cm)	Varenr.
7,5 x 7,5	9631
12,5 x 12,5	9632
18 x 18	9635

Biatain Soft-Hold

Str. (cm)	Varenr.
5 x 7	3473
10 x 10	3470
10 x 20	3472
15 x 15	3475

Biatain Ag

Str. (cm)	Varenr.
23 x 23 Sakral	9641
19 x 20 Hæl	9643

Comfeel Plus Transparent

Str. (cm)	Varenr.
5 x 7	3530
10 x 10	3533
9 x 14	3536
9 x 25	3537

Biatain klæbende

Str. (cm)	Varenr.
7,5 x 7,5	3462
12,5 x 12,5	3420
15 x 15	3421
18 x 18	3423
18 x 28	3426

Comfeel Plus Transparent

Str. (cm)	Varenr.
15 x 20	3542
5 x 25	3548
18 x 20 sakral	3285
6 x 8 contour	3280
9 x 11 contour	3283

Kontakt venligst Coloplast Danmark A/S for yderligere information vedrørende Comfeel Plus og Biatain bandager.

Referencer

1. Sibbald, R.G. et al, Preparing the Wound Bed 2003: Focus on infection and inflammation, Ostomy/Wound Management, November 2003, Vol. 49 (11): 24-51.
2. Fletcher, J. A practical approach to dressing wounds in difficult positions. British Journal of Nursing, 1999, Vol. 8 (12): 779-786.

“Denne guide er en hjælp til bandagering i praksis. Bandager er dog kun en del af den holistiske patientfokuserede sårbehandling”

Forfatterne

Bemærk venligst

– at denne guide er tænkt som generelle retningslinjer. Husk altid at tjekke de lokale anbefalinger på din afdeling eller i din kommune.

- >> Hvad er årsagen til såret?
- >> Følg altid de lokale procedurer for behandling af inficerede sår for at forhindre krydsinfektioner. Ved bakteriel infektion eller svampeinfektion brug en sølvbandage.
- >> Anvend altid en skarp ren saks.
- >> Husk altid at klippe tværs over beskyttelsesfilmen. Ellers kan denne være svær at fjerne.
- >> Når der klippes i bandagen, bør hjørnerne rundes for at sikre en bedre hæftning.
- >> Gem beskyttelsesfilmen som skabelon til fremtidige bandager.
- >> Husk at pleje hudomgivelserne omkring såret med beskyttelsescreme.
- >> De fleste producenter anbefaler, at bandagen placeres lige over såret, men overvej også effekten af eventuelle fordybninger omkring såret. Placer derfor bandagen, så der tages højde for i hvilken retning sår væsken eventuelt vil løbe.
- >> Sæt altid bandagen således, at den ikke trækker i huden, da dette kan give små vabler.
- >> Selvom nogle bandager kan give en form for 'polstring' og reduktion af friktion, forebygger dette ikke risiko for tryk.
- >> For alle led, der skal bandageres, gælder det, at principperne for tilpasning er den samme. Eksempler i denne klippeguide kan derfor sagtens anvendes på andre led end dem, der er nævnt her.

Historien om Coloplast startede i 1954

Elise Sørensen er sygeplejerske. Hendes søster, Thora, er blevet stomi-opereret og hun holder sig hjemme, da hun er bange for at få lækage. Ved at se og opleve sin søsters problemer, opfinder Elise verdens første klæbende stomipose. En sikker pose giver Thora – og tusindvis af andre i hendes situation – muligheden for at vende tilbage til deres normale liv. En enkel løsning med stor betydning.

I dag omfatter vores forretning stomi, kontinens og hud- og sårpleje. Men måden vi driver forretning på følger stadig Elises eksempel: vi lytter, vi lærer og vi udvikler produkter og services, som gør livet lettere for mennesker med specielle behov.

For mere information, se www.woundcare.coloplast.com

Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje.

Vores forretning omfatter stomi, urologi og kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et globalt selskab med mere end 7000 ansatte.



Coloplast Danmark A/S
Møllevvej 11-15
2990 Nivå

www.coloplast.dk

En lommeuide

Udarbejdet af

- Pia Carlsen, sår-sygeplejerske, Danmark
- Jacqui Fletcher, sygeplejerske, England
- Maria Mousley, fodterapeut, England
- Henri Post, sygeplejerske, Holland
- Adrienne Taylor, sygeplejerske, England
- Wilma Verbeek-Gijsbers, sygeplejerske, Holland
- Robert Zimmer, sygeplejerske, Tyskland

Klippe- og håndteringsguide

Biatain



En patientfokuseret tilgang til sårbehandling

Denne klippe- og håndteringsguide er udarbejdet af specialister, som i deres hverdag dagligt ser sår, der er svære at bandagere.

At lægge bandager på sår er en del af den holistiske sårbehandling, hvor målet er, at patienten er i centrum. Et vigtigt mål er at opnå en hurtig sårheling for patienten ved at skabe et optimalt forhold for helingen. Det er vigtigt at se patienten som en helhed, undersøge årsagen til såret og samtidig håndtere og forstå patientens bekymring, før man ser på selve såret ⁽¹⁾.

Patienter med kroniske sår kan have mange bekymringer, som er vigtige at være opmærksom på. Dels er der tiden til ophelingen, dels kan der være lugtgener, lækage, maceration, smerter, infektion og social isolation.

Selvom der i dag findes et utal af forskellige bandagemuligheder, findes der stadigvæk sår i praksis, som er en udfordring at få til at hele op ⁽²⁾.

Hvis du har spørgsmål eller andre gode forslag til alternative former for bandagering, er du meget velkommen til at kontakte os (dklrh@coloplast.com).